

TECHLAB®

COMPLETE RESULTS

TECHLAB C.DIFF QUIK CHEK コンプリートキット

GDHおよびTox A・Bを同時に検出

- 1デバイスで*C. difficile*のグルタミン酸デヒドロゲナーゼ抗原およびトキシン A・B を検出
- 30分で判定可能
- *C. difficile*の存在およびトキシンを産生しているかどうかを確認
- 特許取得済みの upflow 技術によりデバイス上には明瞭な背景と青い検出ラインを示します

体外診断用医薬品

製造販売承認番号 30300EZI00001000

品名	TECHLAB C.DIFF QUIK CHEK コンプリートキット
製品コード	902305258
包装単位	25テスト / 箱
有効期限	製造後24ヵ月
貯蔵方法	2 ~ 8°C
適応検体	新鮮便、凍結便、輸送培地 (キャリアブリア培地またはC&S)
測定時間	30分以内
測定原理	EIA法



TECHLAB C.DIFF QUIK CHEK コンプリートキット

TECHLAB C.DIFF QUIK CHEK コンプリートキット

操作方法（液体/半液状便の場合）


1

試験管に下記試薬を添加

- ・ 希釈液 (Diluent) 750 μ L
- ・ 酵素標識抗体 (Conjugate) 1滴
- ・ 検体 25 μ L

(ピペットの1番目のマークまで)


その後十分に混和。

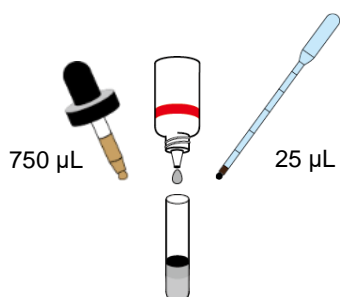

2

新しいピペットで調整液


500 μ L(ピペットの1番上のマークまで)を検体添加部へ添加し、室温で15分間静置。

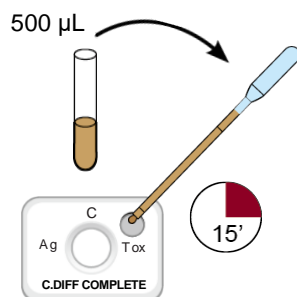

3


洗浄液 (Wash Buffer)

300 μ Lを判定部に滴下し、十分に吸収させる。

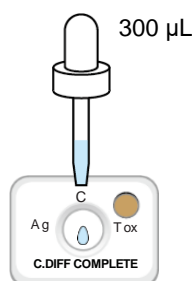


4

基質液 (Substrate) 2滴を判定部に滴下し、10分後に結果を読み取る。

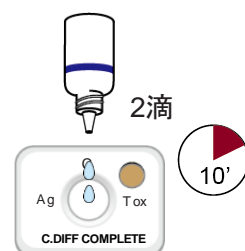


読み取りやすい結果

- ・ 装置なしで30分で判定可能
- ・ よく使用されているTECHLAB® QUIK CHEK™シリーズ
- ・ シンプルで結果が分かりやすい
- ・ その他追加事項については添付文書を参照してください

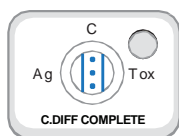


抗原 / トキシン陽性

C. Difficile が存在
トキシン産生

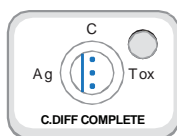

抗原陽性
トキシン陰性

C. Difficile が存在

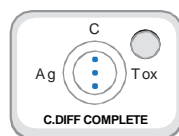

抗原 / トキシン陰性

C. Difficile の存在なし



販売元



コージンバイオ株式会社

〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-1-3

TEL: 049-284-3781 FAX: 049-284-4784

URL: <https://kohjin-bio.jp/>

製造販売元



〒105-0021

東京都港区東新橋
2-10-10 東新橋ビル

製造元



PROVEN DIAGNOSTIC PERFORMANCE

www.techlab.com